



ODONTOMEGA

RESINA 3D PRINTAX PRESS & CAST

# GUIA PARA ELIMINAÇÃO NO FORNO DE ANEL





### PASSO 01

Temperatura de entrada: **900-950°C**


### PASSO 02

Utilizar sempre o anel quente, **15-20 minutos** após vazar.

### PASSO 03

Posicionar o anel no forno com a abertura virada para baixo, com **ângulo de 45°** (vide imagem abaixo), facilitando o escoamento e evaporação da resina.

***Tempo de permanência: 1 hora.***

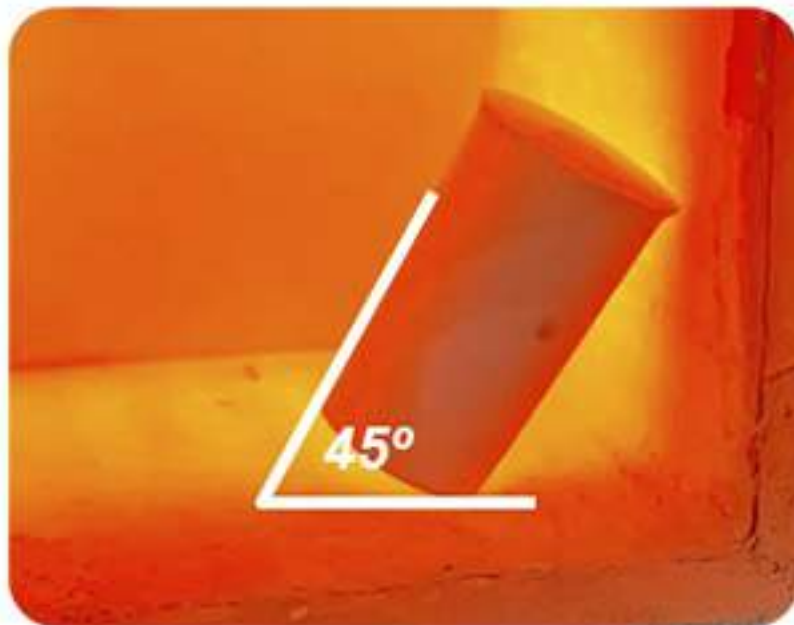

**Conceitos para a Press & Cast Blue e Green**

*Protocolo por Thiago Bin Dental Designer*