



ODONTOMEGA

POLIDORES

EVE



Polidores TWIST

Utilize a rotação **SOMENTE** no sentido das cerdas.



Não realizar esterilização química ou **NENHUM** outro tipo de produto químico na limpeza dos polidores.

***Utilize apenas o método de esterilização por autoclave.**



Utilize sempre a rotação indicada para cada tipo de polidor para evitar dano ou desgaste excessivo.

TWIST: 3' - 8.000 | **BRACKETS:** 5' - 7.000

PROPHYCLEAN: 5' - 10.000

134 °C

Todos os polidores EVE são autoclaváveis, utilize este método de esterilização.

***JAMAIS autoclave as bases e tampas de plástico que acompanham os polidores.**

~~PASTA DE POLIMENTO~~

Os polidores EVE possuem abrasivos diamantados de óxido de alumínio ou carbeto de silício, dispensando o uso de pasta de polimento.



Faça uso de equipamentos de proteção adequados.