



Manual de operação

Aquecedor Megaflame





| Código | Energia | AMP | Fusível | Temp. | Comprimento | Profundidade | Altura | Peso |
|---------|---------|------|---------|-------|-------------|--------------|--------|--------|
| 09-302 | 110V | 100W | 2A | - | 91mm | 209mm | 89mm | 0,53kg |
| 09-302b | 220V | 100W | 2A | - | 91mm | 209mm | 89mm | 0,53kg |

MODO DE USO



- Ajustar o senso de sensibilidade na lateral. A sensibilidade aumenta girando para direita e diminui girando para a esquerda;
- Usar uma chave Philips para ajustar a sensibilidade;
- Inserir o instrumental no centro do buraco para um melhor aquecimento;
- Após ligar o produto, uma luz verde deve estar acesa para o uso correto. Em caso de luz vermelha sem que o sensor esteja ativado, veja a resolução de problemas.
- O sensor no topo do equipamento detecta quando sua mão passa na frente. Quando o sensor é acionado, a luz que estava **verde**, fica **vermelha** e o instrumento será aquecido instantaneamente.
- Vem com capa protetora de borracha, mais um refil. Protege o equipamento para que o instrumental com cera quente não atinja o orifício de aquecimento.

PRECAUÇÕES

- Não manejar com as mãos úmidas ou molhadas;
- Não deixar a luz solar ou lâmpada de calor interferir no sensor;
- Não encostar o instrumental quente ou com cera no sensor;
- Não desmontar o equipamento sem conhecimento técnico;
- Não usar o equipamento com cabo de força ou tomada danificados;
- Não dobrar ou esmagar o cabo de energia;
- Não bloquear a saída da ventilação na parte inferior do equipamento;

- Desconectar da energia em caso de tempestades de raios ou quando não for utilizar por um longo período;
- Não usar o equipamento perto de torneiras, reservatórios de água, jatos de vapor, sprays de água ou perto de lugares com muita poeira;
- **Não colocar o dedo dentro do equipamento em funcionamento;**
- Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos, contatar imediatamente a OdontoMega.

GARANTIA

Garantia Legal

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor.

- 1•** A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural das partes;
- 2•** A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3•** Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4•** Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela OdontoMega dentro do período de garantia legal.

Garantia estendida

A OdontoMega garante a seus clientes, sempre produtos com altíssima qualidade, testados, em perfeitas condições e com certificação europeia CE. Deste modo, também oferecemos extensão da garantia legal por mais 90 (noventa) dias.

Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas:

- 1•** A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural das partes;
- 2•** A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3•** Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4•** Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela OdontoMega dentro do período de garantia legal.



Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto - SP - CEP: 14015-120

E-mail: odontomega@odontomega.com.br

Telefone: (16) 3610-9636

Site: www.odontomega.com.br