



ODONTOMEGA
.com.br





☎ (16) 3610-9636

📞 (16) 99404-2888

✉ odontomega@odontomega.com.br



Função e escolha da cor:


TR - Transparente	W-White	BL- Bleach	A1 - Cor A1
			
<p>Função: Cimentação sem necessidade de adequação de cor. O laminado já está na tonalidade ideal.</p>	<p>Função: Aumenta o valor, bloqueia o substrato. Ideal para pacientes que desejam dentes mais claros.</p>	<p>Função: Ajuste leve de valor, corrigindo pequenas manchas no substrato para uma perfeita cimentação.</p>	<p>Função: Ajuste da cor do laminado em relação ao substrato.</p>
<p>Cimento Cód.: 07-321</p>	<p>Cimento Cód.: 07-327</p>	<p>Cimento Cód.: 07-324</p>	<p>Cimento Cód.: 07-301</p>
<p>Try-in Cód.: 07-421</p>	<p>Try-in Cód.: 07-427</p>	<p>Try-in Cód.: 07-424</p>	<p>Try-in Cód.: 07-401</p>

*Sempre testar com Megalink Esthetic TR antes de qualquer cimentação. Essa cor é utilizada quando o laminado já está na tonalidade ideal desejada.

Cimentação de lentes e laminados de dissilicato de lítio e cerâmicas feldspáticas com linha de cimentação Megalink




ODONTOMEGA
.com.br

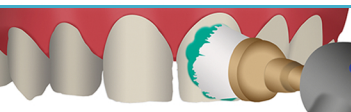

Remover completamente o cimento temporário e qualquer resíduo. Limpar com pasta isenta de flúor e escovas EVE Unibrush.



Preencher o laminado com Megalink Try-in para verificar a tonalidade desejada. Colocar as lentes na posição desejada para simular o resultado final.

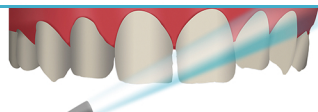

Após identificar a cor de cimento desejada, limpar completamente os resíduos de try-in. Para remoção total do try-in, limpar com spray de água e secar com ar livre de óleo. Limpar a superfície com ácido fosfórico por 15 segundos, enxaguar e secar.



Preparar para cimentação adesiva condicionando o laminado com ácido fluorídrico 5% por 20 segundos. Enxaguar e secar completamente. Aplicar Silano Primer Megabond (1:1), de acordo com as instruções do silano, e secar por 2 min. com ajuda de um secador.



Condicionar o preparo com ácido fosfórico 37% Megagel por 20 segundos. Limpar com spray de água e secar com ar livre de óleo. Evitar contato com dentes que não serão restaurados e com gengiva exposta.



Aplicar uma camada uniforme de Adesivo Megabond no preparo. O adesivo pode ser polimerizado em conjunto com o cimento caso o aparelho foto tenha potência. Polimerizar o adesivo após a aplicação do mesmo caso tenha dúvidas sobre o aparelho.



Aplicar cimento Megalink Esthetic da cor escolhida no laminado. Dica: Aplicar o cimento começando na área incisal indo para a área cervical.



Posicionar os laminados em cima do preparo. Com um pincel Allwhite pequeno, limpar os excessos. Caso seja necessário, utilize o fotopolimerizador por 1-2 segundos para facilitar a remoção de excessos. A limpeza fina de excessos pode ser feita com fio dental.



A fotopolimerização final deve ser feita de todos os lados do laminado, por 40 segundos cada lado. Utilizar tiras metálicas diamantadas EVE Diastrips para ajustes interproximais. Realizar polimentos finais e ajustes necessários.